


ペン玉

筆記具 食器を持ちやすく

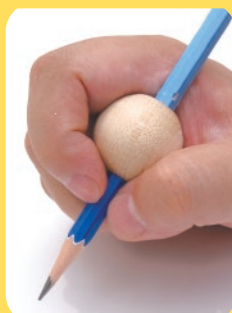

筆記具・スプーン・フォーク
歯ブラシなどを
手になじむボールで
握りやすく!






2歳ぐらい（鉛筆握りでピンチ、アーチの練習）から
高齢者（諦めていた年賀状や絵手紙を書きやすく）まで
握力低下などで細いものを持つのに苦労している方に



特長

ネジ止めだから ●ズれない! ●すぐはすせる!

親指・人差し指のアーチの訓練に

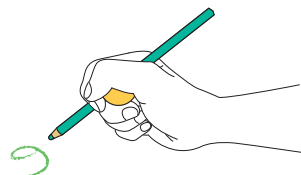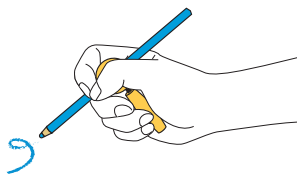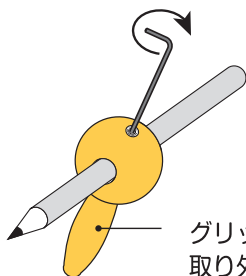


姉妹品として握りを手助けする「モネ」もあります。
詳しくはホームページでもにご覧ください。➡




使い方



穴に差し込みます。

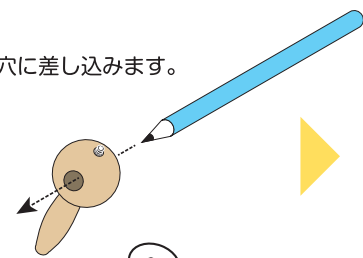


使いやすい位置を決めます。

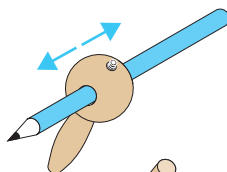

付属のレンチで
ネジを締め固定します。

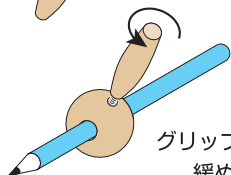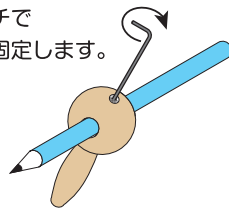

グリップもネジ止めなので
緩めれば外せます。

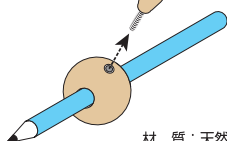

いろいろな身の回り品も、
持ち方や使い方をお試しください。

材質：天然木

サイズ：【小玉】φ30mm/穴φ10mm・穴φ14mm（グリップ）φ12mm/長さ30mm

サイズ：【大玉】φ35mm/穴φ10mm・穴φ14mm（グリップ）φ15mm/長さ45mm

有限会社ウインド

〒604-0962 京都市中京区夷川通御幸町西入達磨町588-1 TEL. 075-257-8184 FAX. 075-257-8185

hashizokun.com

ペン玉 は全部で4種、用途に合わせてお選びください。

小玉

直径 **30mm**

PT-1

●対象年齢：2歳～・比較的手の小さな成人（リュウマチ、頸損、握力不足、指の運動機能低下の方など）

穴径 **10mm**

使用例：太さ10mmまでの鉛筆（学校で使う鉛筆）、事務用ボールペン（ノック式でないキャップ式のもの）、絵画用小筆、ケータイ用タッチペン、習字の小筆ペン（主に名前を書くときのもの）



ペン玉（小玉-10）× 3個＋レンチ×一本



PT-2

2才ぐらい～

穴径 **14mm**

使用例：太さ14mmまでのシャープペンシル・ボールペン（ノック式）、絵画用太絵筆、太さ10mm以上のケータイ用タッチペン、筆ペン（主に年賀状を書く時の筆ペン）、マーカー（サインペン）、歯ブラシ、スプーンなど



ペン玉（小玉-14）× 3個＋レンチ×一本

大玉

直径 **35mm**

PT-3

●対象年齢：12歳～・成人（リュウマチ、頸損、握力不足、指の運動機能低下の方など）
ペン玉（小玉）よりも5mm大きな玉です。わずか5mmですが手の中での存在感が増します。

穴径 **10mm**

使用例：太さ10mmまでの鉛筆（学校で使う鉛筆）、事務用ボールペン（ノック式でないキャップ式のもの）、絵画用小筆、ケータイ用タッチペン、習字の小筆ペン（主に名前を書くときのもの）



ペン玉（大玉-10）× 2個＋レンチ×一本



PT-4

12才ぐらい～

穴径 **14mm**

使用例：太さ14mmまでのシャープペンシル・ボールペン（ノック式）、絵画用太絵筆、太さ10mm以上のケータイ用タッチペン、筆ペン（主に年賀状を書く時の筆ペン）、マーカー（サインペン）、歯ブラシ、スプーンなど



ペン玉（大玉-14）× 2個＋レンチ×一本

ペン玉 別売オプションのご紹介

キーボードをタッチしやすいように重心バランスを考慮したキーボード操作用の道具です。

太さφ9mm×長さ150mm1本/1100円(税込み)

キーボード用
タッチペン

PT-9



オプションはホームページでのみ販売します。

ご希望のお客様は、「箸ぞうくん」ホームページへ



手の大きさに合わせた直径30mmと35mmの木製の球です。それぞれ中心に穴をあけて鉛筆、ボールペンなどを通して握りやすくした、「握る」ということを考えた訓練具、自助具です。

例えば、2～3歳児でも中央の穴に鉛筆を差し込み親指と人差し指の付け根に玉を当てて鉛筆を握ると、自然と親指と人差し指がアーチ構造を作りながらの「鉛筆握り」の指の形ができます。生活の中で鉛筆の握り方、摘み方（ピンチ）の訓練が自然とでき、筆圧の補助に使えます。ネジ止め

ですので使用時にも玉はズレません。しかも、このネジを1回転して緩めると鉛筆がスルッと抜けて鉛筆削り器に。手間がかかりません。ネジを回すレンチ付きです。

「玉」だけでも安定した性能を発揮しますが、さらにグリップ延長棒を利用することで手の中で引っ掛かりができ握りやすさ、安定感を増します。

また、いろいろな持ち方を試していただいて、握れない、力がない等の指の運動機能障害で困りの方々にも同じようにご利用いただけます。

